


Sekusept® Poeder Classic

Krachtige reiniging en desinfectie voor instrumenten en Medical Devices (CE0297)

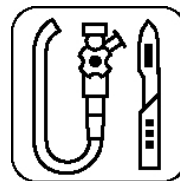

- Sekusept Poeder CLASSIC, de “klassieke” waarde :
 - universeel inzetbaar
 - maximale reiniging en desinfectie
 - succesvol sinds meer dan 30 jaar

- uitstekende reiniger
- uitstekende en hemolyserende werking
- breed werkingsspectrum

Onze prestaties	Uw nut
DESINFECTIE	
- Voldoet zowel aan de EN-, AFNOR* als aan de DGHM**-normen	- Optimale veiligheid voor de gebruiker
- Hoogrenderende samenstelling	- Korte inwerktijden, lage toepassingsconcentraties, praktische en wetenschappelijke oplossing voor een breed toepassingsgebied
REINIGING	
- Geschikt voor gebruik in ultrasoonbad	- Zeer goede reinigingskracht ook bij sterke vervuiling, verwijdert hardnekkige residu's
- Zelfreinigend vermogen	- Maximale reinigingskracht zonder veel te borstelen; moeiteloze reiniging van oppervlakken
MATERIAALCOMPATIBILITEIT	
- Zeer goede materiaal-verdraagzaamheid	- Voor alle instrumenten uit inox, plastic, synthetische materialen gebruikt in anesthesie, urologie en chirurgie
- Volledig oplosbaar, stofarm poeder	- Gebruiksvriendelijke dosering. Ook voor holle instrumenten met nauw lumen.

Toepassingsgebied

Voor de reinigende ontsmetting van medische instrumenten uit metaal, kunststof, elastomeren, glas, enz.
Ook toepasbaar voor de ontsmetting van Medical Devices-oppervlakken. Uitstekend geschikt voor de desinfectie van incubatoren en medische badkuipen.
Eveneens in te zetten voor reiniging en desinfectie van dentale prothesen. NIET GESCHIKT voor flexibele endoscopen en instrumenten uit aluminium of vernikkelde instrumenten.

Aanbevolen toepassing

Sekusept Poeder Classic bij het koude (lauwe) water in de instrumentenkup voegen aan een dosis van 2 %, dit is 20 g poeder per liter water. Meermaals de oplossing omroeren. Na 15 min. is de oplossing gebruiksklaar. Onmiddellijk na gebruik de instrumenten in de oplossing leggen. Hierbij letten op een volledige onderdompeling. Na de voorgeschreven inwerktijd de instrumenten uit de oplossing nemen en met water van minstens drinkwaterkwaliteit afspoelen. De oplossing minstens dagelijks verversen.

Samenstelling

Antimicrobiële bestanddelen, niet-ionische tensiden, fosfaten, carbonaten. 100 g bevat : 20 g Natriumperboraat, 15 g Tetraacethylethyleendiamine (TAED).

Microbiologische resultaten	Conc. %	Inwerktijd
• EN 1040 (NF T72-152) bactericide	0,25	5 min.
• EN 1276	1,0	5 min.
• Pr EN 13727	1,0	15 min.
• Instrumentendesinfectie vlg DGHM-methode, zonder TBC	2,0	60 min
• Instrumentendesinfectie volgens DGHM, in ultrasoonbad	2,0	15 min.
• EN 1275 (NF T72-202) Candida albicans	2,0	15 min.
• Oppervlakkendesinfectie (Med. Device) volgens DGHM	0,5	4 uur
• Desinfectie van medische badkuipen	1,5	60 min.
	2,0	2 min.

Virologische resultaten	Conc. %	Inwerktijd
Werking tegen virussen :		
• HBV, HIV in DNS-Polymerasetest	2,0	10 min.
• Rota	1,0	60 min.
• Volgens DVV-methode*** :		
Adeno	2,0	5 min.
Papova	2,0	5 min.
Vaccinia	2,0	5 min.
Polio	2,0	3 uur

Verpakking :	Ref.	Verp.
• Eenheidszakje 100 gr.	817413	50 x 100g
• Emmer van 10 kg met doseerbeker	817414	10 kg
• Emmer van 2 kg met maatschepje	817415	4 x 2 kg

Attesten : Uitgebreid getest ; zowel microbiologisch, virologisch, toxicologisch als ecologisch. Deze testresultaten alsook het attest van compatibiliteit met materialen, zitten allen vevat in een uitgebreid productdossier. Op verzoek verkrijgbaar.

* AFNOR = Association Française de Normalisation

** DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

*** DVV = Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten