

Mepilex® Border

ZELFKLEVEND ABSORBEREND SCHUIMVERBAND

- Minimaliseert pijn en weefseltrauma
- Uitstekend exsudaatmanagement
- Zelfklevend dus secundaire fixatie is niet nodig
- Douchebestendig

Polyurethaan film op de rugzijde


- Lucht- en waterdampdoorlaatbaar
- Waterdicht
- Virus- en bacteriebestendig (>25nM)

Safetac® laag

- Atraumatisch bij verbandwissels
- Kleeft niet in de wonde
- Minder risico op maceratie

3 laags wondkussen


- Absorbeert veel exsudaat
- Minder risico op lekkage, verwerking en maceratie

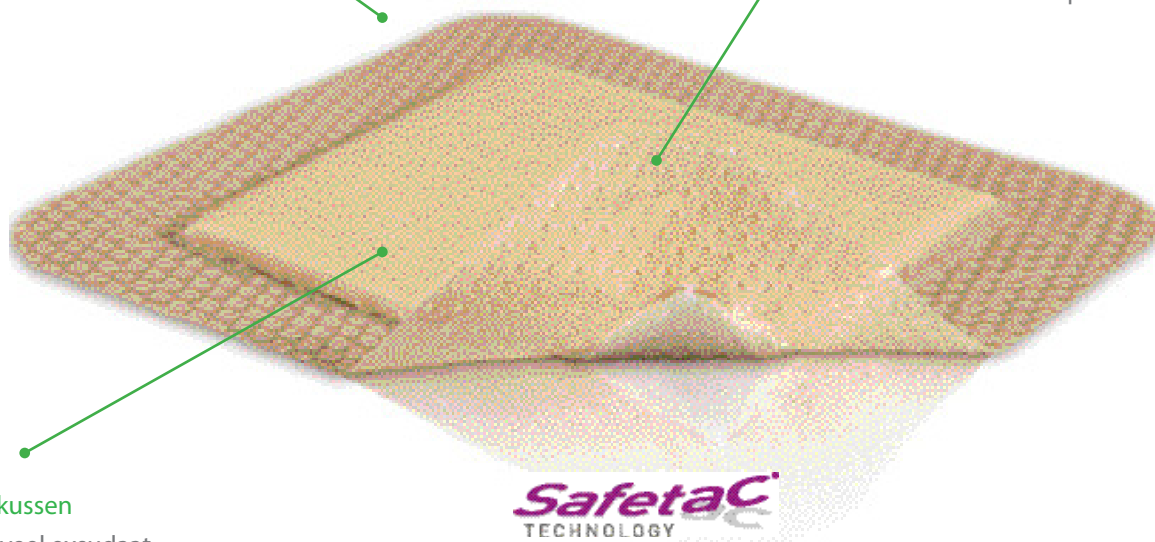


Safetac® technologie

Safetac is een unieke en gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor de patiënt en trauma aan de wond minimaliseert. Safetac is uitsluitend beschikbaar bij wondverbanden van Mölnlycke Health care, waaronder Mepilex wondverbanden, Mepitel, Mepiform en Mepitac.

Surf voor meer informatie naar www.safetac.com

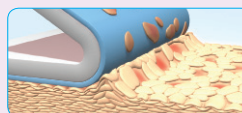

Traditionele kleeflagen hechten zich alleen aan de tophuidcellen. Daardoor kleeft het verband plaatselijk harder om ter plaatse te kunnen blijven.

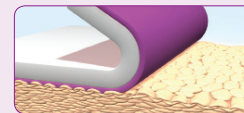

Safetac vormt zich naar de huidporiën en sluit daarbij de wondranden goed af. Het kleeft bovendien niet in een vochtig wondbed.

Gebruiksaanwijzing Mepilex® Border




1. Reinig het wondgebied.
Verwijder het schutblad.



2. Breng de klevende zijde op
de wond aan. Het verband niet
uitrekken.

Gebruiksaanwijzing Mepilex® Border Sacrum

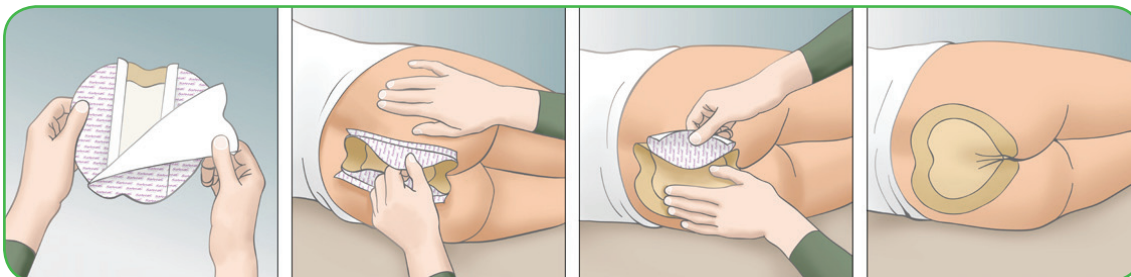

1. Reinig de wondsite, droog de
huid zorgvuldig en verwijder
het middelste schutblad.

2. Breng de kleeflaag op de
wond. Niet uitrekken.

3. Verwijder het schutblad
aan de ene zijde, breng het
verband aan en strijk glad.
Herhaal nu aan de andere
zijde. Niet uitrekken.

4. Strijk het verband en de
borders glad.

Voordelen

- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels
- Minimaliseert risico op maceratie
- Uitstekend exsudaatmanagement
- Aangenaam draagcomfort
- Kan meerdere dagen op de wond blijven, afhankelijk van de wondconditie
- Sterke en huidvriendelijke fixatie
- Geen extra fixatie nodig
- Douchebestendig

Indicaties

- Vochtige tot zeer natte wonden
- Doorligwonden
- Acute letsels zoals schaafwonden, oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden
- Postoperatieve wonden

Voorzorgsmaatregelen


Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen

Mepilex Border assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	Z-indexnr.	Stuks/RET	Stuks/TRP
295200	7,5x7,5	15744027	5	70
295300	10x10	15744035	5	50
295400	15x15	15744086	5	50
295600	15x20	15744094	5	45
295800	10x20	15744043	5	35
295850	10x25	15744051	5	35
295900	10x30	15744078	5	25

Mepilex Border Sacrum assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	Z-indexnr.	Stuks/RET	Stuks/TRP
282500	15x15	15690156	5	50
282000	18x18	15259692	5	40
282400	23x23	15259702	5	25

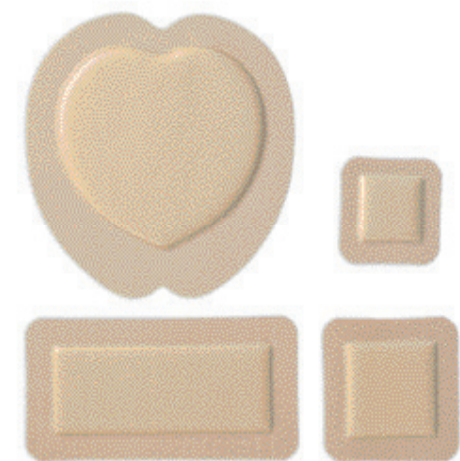

Meer informatie op www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 (0)76 521 96 63 - Fax +31 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care, Mepilex® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.