




LADY NIGHT PAD 6


Attends Lady Night Pad 6 is een anatomisch gevormd incontinentieverband voor 's nachts. Een bredere achterkant zorgt voor extra bescherming tijdens de nacht. Deze is geschikt voor matig tot zwaar urineverlies.




Gebruiksaanwijzing

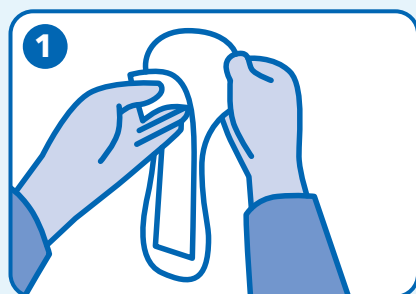


1 Verwijder de zelfklevende plakstrook aan de onderzijde van de inlegger.

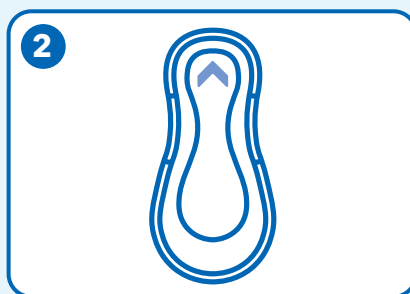

2 Zorg ervoor dat het smalste deel van de inlegger is naar voren geplaatst.

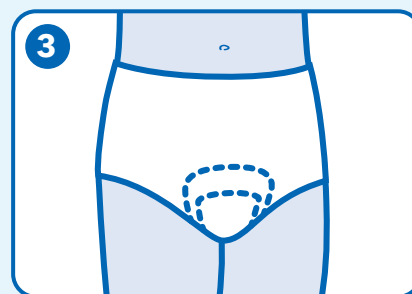

3 Bevestig de inlegger in uw eigen ondergoed met de plakstrook naar onderen en het bredere deel naar achter. Zorg ervoor dat u nauwsluitend ondergoed gebruikt.

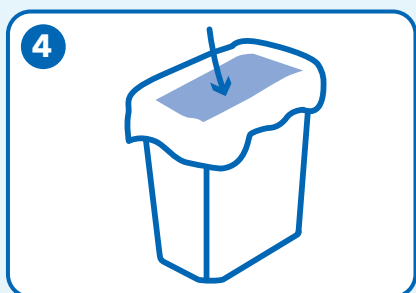

4 Rol vervolgens het gebruikte incontinentieverband op en deponeer het bij het gewone afval.

LADY NIGHT PAD 6

Hints en Tips

Productkeuze

- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat het gekozen product op de juiste manier bevestigd wordt in goed aansluitend ondergoed.

Verwijderen

- Rol vervolgens het gebruikte incontinentieverband op en deponeer het bij het gewone afval.
- Attends Lady Night Pad 6 is per stuk verpakt. Het zakje kan ook gebruikt worden om het product na gebruik in te rollen en in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
- Spoel de inlegger na gebruik nooit door het toilet.



Huidverdraagzaamheid
dermatologisch goedgekeurd
door proDERM, Instituut voor
Toegepast Dermatologisch
onderzoek