



Gebruik van traditionele wondbedekkers

Bij de behandeling van wonden, met name chronische wonden, is vochtige wondbehandeling met speciale wondbedekkers meestal eerste keus. Echter in sommige gevallen kiest de behandelaar voor droge wondbehandeling met traditionele wondbedekkers, zoals gaas- en nonwoven kompressen, absorberende verbanden, vetgazen of zalfverbanden.

Indicaties traditionele wondbedekkers

Reinigen van wonden

Traditionele kompressen worden gebruikt bij het reinigen van wonden. Voor snelle reiniging wordt het kompres vochtig gemaakt met een wondspoelvloeistof (bijvoorbeeld NaCl of Prontosan) op kamertemperatuur en wordt de wond schoon gedept. Breng bij hardnekkig wondbeslag het vochtige kompres gedurende 15 minuten op de wond aan om het beslag te verwijderen.

Primair gesloten chirurgische wonden

Deze wonden, onder ideale schone omstandigheden gemaakt, kunnen prima afgedekt worden met een eenvoudig kompres of een eilandpleister (een kompres met rondom een plakrand). Voor een mooier litteken en het voorkomen van post-operatieve wondinfectie is het aan te raden om een antibacteriële wondzalf/gel* op de wond aan te brengen.

Droge necrose zonder ontstekingsverschijnselen

Om de necrosekorst verder te laten verharderen totdat deze eraf valt, worden traditionele kompressen als wondbedekker ingezet.

Bij excisie na bijvoorbeeld bijtwond of een abces

Na excisies worden natte gaaskompressen gedurende 1-2 dagen aangebracht om de wond tot rust te brengen. Hierna wordt een aanvullend wondbeleid opgesteld.

* Zie speciale wondwijzer: Mesitran Soft

Afdekken van alledaagse wondjes

Alledaagse kleine wondjes worden afgedekt met traditionele wondbedekkers. Kies bij voorkeur een product dat minder snel aan de wond verkleeft zoals een Novopad of Alupad of plaats een zalfkompres en dek deze af met een gaas- of nonwoven kompres om verkleefing te voorkomen. Gebruik om de wondgenezing te stimuleren, verkleefing te voorkomen en bacteriën te doden eerst een antibacteriële wondgel* op de wond.

Bij medicinale zalven

Voor het op de plaats houden van medicinale zalven en het beschermen van de kleding wordt het traditionele Engels pluksel ingezet. Wanneer er huid op huid contact is, bijvoorbeeld onder de borsten of tussen huidplooien, wordt Engels pluksel tussen de huidlagen geplaatst om smetten (vochtletsel) te voorkomen. De handen beschermt men bij zalven met Kliniglove verbandhandschoenen.

Let op: Gebruik liever geen traditionele kompressen bij brandwonden, ontvelingen, transplantaten en chronische wonden. Zie voor geschikte producten de Klinion speciale wondwijzer.

Dagelijkse verbandwissel

Wanneer er wordt gekozen voor een traditioneel product voor het behandelen van de wond moet het verband dagelijks, soms zelfs vaker per dag, verwisseld worden. Dit om te voorkomen dat het kompres met de wond verkleeft, waardoor al het nieuw gevormde weefsel kapot getrokken wordt en de wondgenezing stagneert.

Creëer toch een vochtig wondmilieu

Ook bij het gebruik van traditionele producten kan op eenvoudige wijze een vochtig wondmilieu gecreëerd worden. Dek hiervoor het traditionele kompres af met een semi-permeabele wondfolie. De folie houdt het wondvocht tegen en er ontstaat een vochtig wondmilieu. Je kunt dan met het verband douchen. Wel dagelijks verwisselen.









Klinion wondwijzer

Traditionele wondbedekkers



WONDWIJZER TRADITIONELE WONDDEKERS

Type product	Product	Wondvocht	Productinformatie	Bestelnr.	Maat/Inhoud	Verpakking	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memocode
Gaaskompressen, steriel									
	HG Compres 8 lagen	🔴	vervaardigd van 17 draads geweven, 100% katoen, rafelvrij gevouwen stevig kompres met hoge treksterkte sterk absorberend toepassing: afdekken van droge, weinig vochtige wonden, mechanische reiniging, dagelijks verwisselen	4111001	8,5x5cm	16x1st	24x16x1st	13586963	HYDRK5
				4111002	8,5x5cm	100x1st	16x100x1st	13587005	HYDRK5
				4111082	10x10cm	100x1st	16x100x1st	13801309	HYDRK1
	HG Compres 12 lagen	🔴🔴	idem, 12 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit	4111016	5x5cm	10x1st	20x10x1st	14694247	HYDRK5
				4111017	5x5cm	100x1st	20x100x1st	13614312	HYDRK5
				4111084	10x10cm	25x1st	16x25x1st	13598112	HYDRK1
				4111085	10x10cm	100x1st	16x100x1st	13587161	HYDRK1
				4111086	10x10cm	50x2st	16x50x2st	13801325	HYDRK1
				4111088	10x10cm	20x5st	12x20x5st	13887351	HYDRK1
	HG Compres 16 lagen	🔴🔴	idem, 16 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit	4111112	10x20cm	50x1st	12x50x1st	13587218	HYDRK1
				4111223	20x20cm	30x1st	16x30x1st	13749323	HYDRK2
				4111255	20x25cm	25x1st	16x25x1st	14338475	HYDRK2
	Gaasstrook	🔴	vervaardigd van 28 draads geweven katoen toepassing: fistels, opvullen holtes en gedeeltelijk gesloten operatiewonden	4170925	1mx1,25cm	35x1st	9x35x1st	13617656	HYDRG1
4170930				10mx1,25cm	10x1st	24x10x1st	13587234	HYDRG1	
4170932				10mx2,5cm	10x1st	16x10x1st	13587242	HYDRG1	
Gaaskompressen, niet steriel									
	HG Compres 8 lagen	🔴	vervaardigd van 17 draads geweven 100% katoen, rafelvrij gevouwen stevig kompres met hoge treksterkte, sterk absorberend toepassing: mechanische reiniging, niet steriel kompres niet als wondbedekker gebruiken	4111025	5x5cm	100st	60x100st	13801341	HYDRK5
				4111098	10x10cm	100st	20x100st	13620177	HYDRK1
	HG Compres 12 lagen	🔴🔴	idem, 12 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit	4111027	5x5cm	50st	20x50st	13617222	HYDRK5
				4111028	5x5cm	100st	15x100st	13617230	HYDRK5
				4111100	10x10cm	50st	20x50st	13739972	HYDRK1
				4111101	10x10cm	100st	10x100st	13616366	HYDRK1
				4111124	10x20cm	50st	10x50st	13634720	HYDRK1
Nonwoven kompressen, steriel									
	NW Compres 4 lagen	🔴	vervaardigd van 67% viscose en 33% polyester zacht, plooibaar snel absorberend toepassing: droge, weinig vochtige wonden, dagelijks verwisselen	4175001	5x5cm	100x1st	20x100x1st	13755234	NONWK5
				4175002	5x5cm	50x2st	20x50x2st	13755242	NONWK5
				4175003	5x5cm	20x5st	30x20x5st	15504859	NONWK5
				4175010	8,5x5cm consument	16x1st	24x16x1st	13754920	NONWK1
				4175029	10x10cm consument	10x1st	20x10x1st	14694255	NONWK1
				4175030	10x10cm	100x1st	16x100x1st	13755277	NONWK1
				4175031	10x10cm	50x2st	16x50x2st	13755285	NONWK1
				4175040	10x20cm	50x1st	12x50x1st	13755315	NONWK1
	NW Compres Extra 8 lagen	🔴🔴	idem, 8 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit	4175101	5x5cm	100x1st	20x100x1st	13822705	NONWK5
				4175110	5x10cm	16x1st	24x16x1st	13822713	NONWK1
				4175111	5x5cm consument	10x1st	40x10x1st	15119904	NONWK5
				4175130	10x10cm	100x1st	16x100x1st	13822721	NONWK1
				4175131	10x10cm	50x2st	16x50x2st	14015420	NONWK1
4175140	10x20cm	50x1st	12x50x1st	13822748	NONWK1				
Nonwoven kompressen, niet steriel									
	NW Compres 4 lagen	🔴	idem, toepassing: mechanische reiniging, niet steriel kompres niet als wondbedekker gebruiken	4175004	5x5cm	100st	50x100st	13754890	NONWK5
				4175034	10x10cm	100st	50x100st	13755021	NONWK1
	NW Compres Extra 8 lagen	🔴🔴	idem, 8 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit	4175043	10x20cm	100st	20x100st	13755099	NONWK1
				4175104	5x5cm	100st	50x100st	14029766	NONWK5
				4175134	10x10cm	100st	50x100st	14029804	NONWK1
Splitkompressen, steriel									
	HG Drain Compres 16 lagen	🔴🔴	HG Drain Compres vervaardigd van 17 draads geweven, 100% katoen toepassing: afdekken insteekopening drain, split rondom drain plaatsen	4170115	10x10cm	50x1st	12x50x1st	13618008	SPLIK1
				4170116	10x10cm	25x2st	12x25x2st	13618016	SPLIK1
	NW Drain Compres 4 lagen	🔴	NW Drain Compres vervaardigd van 67% viscose en 33% polyester toepassing: afdekken insteekopening drain, split rondom drain plaatsen	4175050	5x5cm	50x2st	20x50x2st	13755331	NONWK5
				4175051	10x10cm	50x2st	16x50x2st	13755358	NONWK1
Niet verklevend kompres, steriel									
	Novopad	🔴	vervaardigd van 30% viscose en 70% katoen, aan beide zijden bedekt met polyethyleen laagje toepassing: matig vochtige wonden, dagelijks verwisselen, kleeft nauwelijks aan de wond	4175060	5x5cm	100x1st	16x100x1st	13755153	NOVOK5
				4175061	10x10cm	100x1st	16x100x1st	13755161	NOVOK1
				4175062	10x20cm	50x1st	12x50x1st	14015455	NOVOK1
	Alupad	🔴	vervaardigd van 70% viscose en 30% polyester, aan één zijde bedekt met aluminium laagje toepassing: matig vochtige wonden, dagelijks verwisselen, kleeft nauwelijks aan de wond	4175064	10x10cm	50x1st	12x50x1st	15289737	ALUPK1
				4175065	10x15cm	50x1st	12x50x1st	15289745	ALUPK1
				4175066	8x10cm trachea	50x1st	12x50x1st	15289729	ALUPK8
Absorberend verband zwaar, steriel									
	Exsupad	🔴🔴🔴	bestaat uit nonwoven wondcontactlaag, 100% katoenen wattenvulling en blauwe hydrofobe buitenlaag, zacht, plooibaar. Wattenvulling zorgt voor goede verspreiding wondvocht over verband groot absorptievermogen toepassing: vochtige tot natte wonden, verwisselen als verband verzadigd is, minimaal dagelijks verwisselen	4170000	9x12cm (wondkussen 9x9cm)	50x1st	8x50x1st	14990784	EXSUV9
				4170002	10x20cm (wondkussen 9x17cm)	35x1st	8x35x1st	13574973	EXSUV1
				4170003	20x20cm (wondkussen 18x17cm)	15x1st	16x15x1st	13574981	EXSUV2
				4170004	20x30cm (wondkussen 18x27cm)	10x1st	8x10x1st	13575023	EXSUV2
				4170005	20x40cm (wondkussen 18x37cm)	6x1st	8x6x1st	13575058	EXSUV2
Absorberend verband zwaar, niet steriel									
	Exsupad	🔴🔴🔴	samenstelling idem Exsupad steriel toepassing: secundair verband, niet direct op de wond plaatsen	4170075	9x12cm (wondkussen 9x9cm)	100st	6x100st	14993473	EXSUV1
				4170070	10x20cm (wondkussen 9x17cm)	25st	24x25st	14338467	EXSUV1
				4170072	10x20cm (wondkussen 9x17cm)	50st	12x50st	13575090	EXSUV1
				4170073	20x20cm (wondkussen 18x17cm)	50st	3x50st	13575112	EXSUV2
				4170067	20x30cm (wondkussen 18x27cm)	50st	3x50st	14677083	EXSUV2
				4170069	20x40cm (wondkussen 18x37cm)	50st	3x50st	15018156	EXSUV2
				Zalfkompres, steriel					
	Klinitulle		vervaardigd van zacht nonwoven materiaal geïmpregneerd met witte paraffine toepassing: verkleeft niet aan de wond, afdekken met secundair kompres, dagelijks verwisselen	4170098	10x10cm	10x1st	24x10x1st	14264617	ZALFK1
				4170099	10x30cm	20x1st	10x20x1st	14990326	ZALFK1
Zalfverband, niet steriel									
	Engels pluksel		vervaardigd van aan één zijde opgeruwde katoen, zacht en plooibaar toepassing: fixatie zalf bij bijv. ontsteking of smetten, beschermt kleding zalf op zachte, wollige zijde aanbrengen	4170057	1mx45cm	1st	10x1st	13617370	ENGEX4
				4170058	5mx45cm	1st	10x1st	13619497	ENGEX4
				4170060	5mx10cm	1rol	10x1rol	13619462	ENGEX1
	Kliniglove verbandhandschoen		vervaardigd van 100% katoen, krimpvrij, naden aan de buitenzijde zowel links als rechts te dragen, per paar verpakt, wasbaar op 30°C meet voor de juiste maat de hand vanaf de onderkant van de handpalm t/m de bovenkant van de middelvinger toepassing: geeft bescherming aan de patiënt en zijn/haar omgeving bij zalftherapie	4170947	small = < 17cm	12x2st	8x12x2st	13575139	VERBX6
				4170948	medium = 18cm	12x2st	8x12x2st	13575147	VERBX7
				4170949	large = 19cm	12x2st	8x12x2st	13575155	VERBX7
				4170950	x-large = 20cm	12x2st	8x12x2st	13575171	VERBX8